




INSTALLATIONSGUIDE / INSTALLATION GUIDE



Välkommen att följa ditt hjärta

Welcome to follow your heart


1

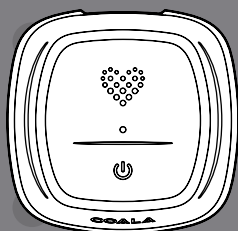


2




3

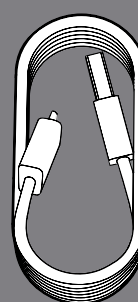


4

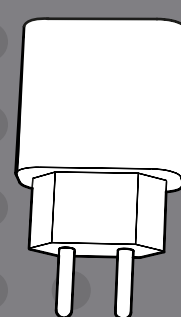

5

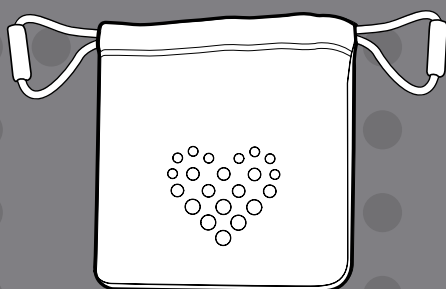

6

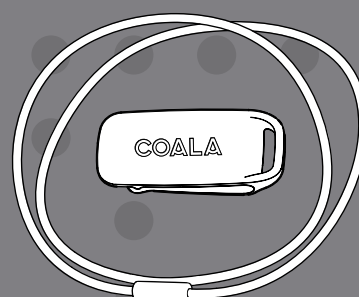

DIN COALA

- 1) Coala Hjärtmonitor 2) Laddningsstation 3) USB-sladd
4) Laddare 5) Resefodral 6) Skydd med band och clip on


YOUR COALA

- 1) The Coala Heart Monitor 2) Charge station 3) USB-cable
4) Wall adapter 5) Travel bag 6) Cover with strap and clip on

KOM IGÅNG GENOM NÅGRA ENKLA STEG EASY STEPS TO GET STARTED


LADDA DIN COALA
CHARGE YOUR COALA

1

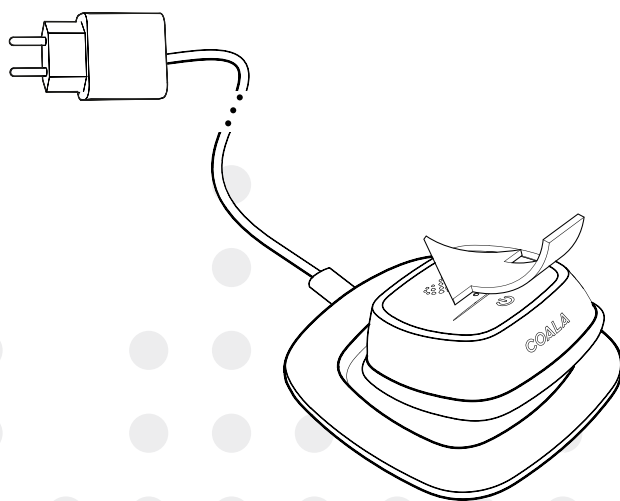

Coala lyser blått när den är färdig-
laddad, ca 2h laddningstid.

The Coala shows a blue light once
it is fully charged, around 2 hrs
charging time.

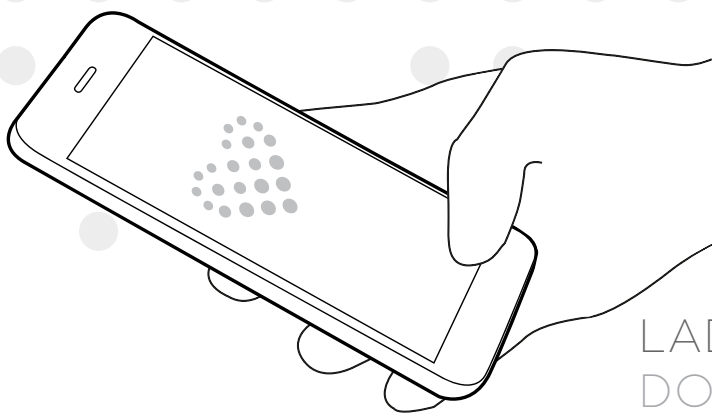

2

LADDA NER COALA APP
DOWNLOAD COALA APP


Ladda ner Coala App från Apple App Store eller Google
Play. Följ instruktioner för installation på din smartphone.

Download Coala App from the Apple App Store or Google
Play. Follow the instructions for installation on
your smartphone.

LÄR KÄNNA DIN COALA GET TO KNOW YOUR COALA

3


INBYGGD
DIGITAL EKG
BUILT-IN
DIGITAL ECG

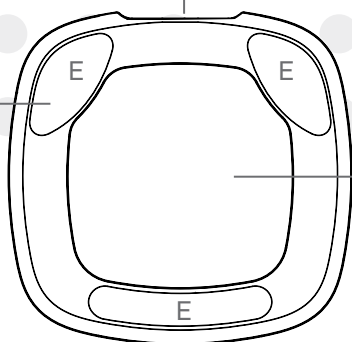

LADDNINGSKONTAKT
Kopplas till laddningsstation
CHARGING CONNECTOR
Connect with charge station

DIGITALT STETOSKOP
Håll mot bröstkorgen för
att spela in hjärtljuden
DIGITAL STETHOSCOPE
Hold against chest to record
heart sounds

LED - Visar
Coalans status*
LED - Indicates the
status of your Coala*

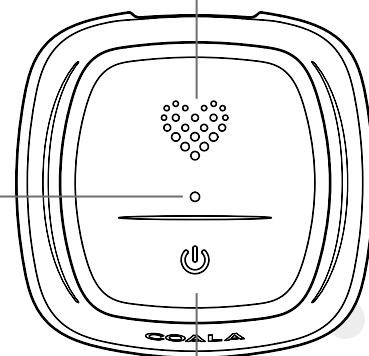


HJÄRTKNAPP
Börja spela in
HEART BUTTON
Start a recording


PÅ/AV KNAPP
ON/OFF BUTTON

* LAMPANS FÄRG BETYDER:
Blått blinkande - Laddar
Blått - Färdigladdad
Grönt blinkande - På
Grönt - Spelar in hjärtljud
Gult blinkande - Låg batterinivå
För mer information vg se
användarmanualen.

* LIGHT INDICATION:
Blue blinking - Charging
Blue - Fully charged
Green blinking - Power on
Green - Recording of heart sounds
Yellow blinking - Low battery indication
For more information,
please see the user manual.

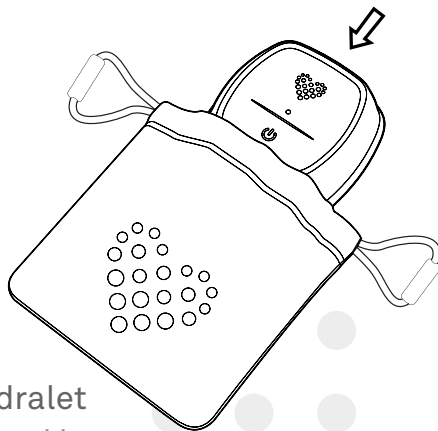

I resefodralet
In the travel bag

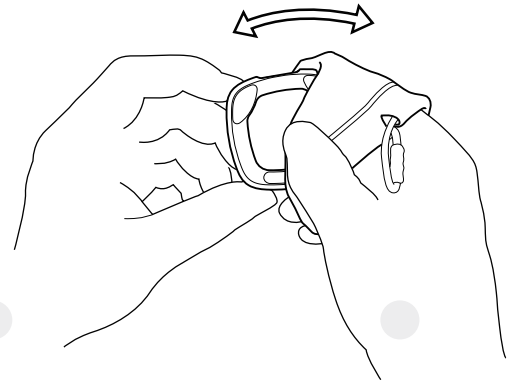

Rengör din Coala med resefodralet
Clean your Coala with the travel bag



Med skydd och clip on som kan
fästas i väska eller byxficka
With cover and clipped on to your
bag or pocket

4

ENKLA SÄTT ATT TA MED DIN COALA
EASY WAYS TO CARRY YOUR COALA



FÖLJ DITT HJÄRTA®

För tips och vägledning kring hur du använder din Coala på bästa sätt, se användarmanualen på www.coalalife.com eller för support vänligen maila support@coalalife.com.

For tips and guidance on how to use your Coala the best way, see the user manual on www.coalalife.com or for support please email support@coalalife.com.

